

6.5 Montage der Seitengitter

Lieferumfang (Abb. 6.5.01) für eine Bettseite:

- 1 x Seitengitter
- 2 x Seitengitteraufnahme
- 4 x Zylinderkopfschraube M8 x 16 ohne Liegeflächenverbreiterung
- 4 x Zylinderkopfschraube M8 x 70 mit Liegeflächenverbreiterung
- 4 x Unterlegscheibe für M8

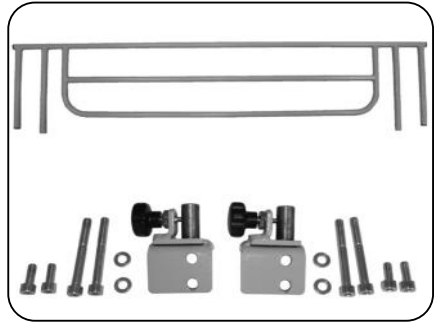


Abb. 6.5.01 - Lieferumfang eines Seitengitters

Montage der Seitengitteraufnahmen



Verwenden Sie keine Matratzenhalter an der Seite, an der das Seitengitter angebracht wird – Klemmgefahr!

1. Entfernen Sie die seitlichen Matratzenhalter.



Bewahren Sie die Matratzenhalter für einen späteren Rückbau auf.

2. Entfernen Sie die Verschlussstopfen aus den Gewindebohrungen des Längsrohres (bzw. aus dem montierten Verbindungsrohr der Liegeflächenverbreiterung) (Abb. 6.5.02 (1)).
3. Befestigen Sie die Seitengitteraufnahme mit den Zylinderkopfschrauben M8 x 16 mit Scheiben (bzw. M8 x 70 mit Scheiben bei montierter Liegeflächenverbreiterung) in den Gewindebohrungen an dem Liegeflächenrahmen (Abb. 6.5.02 (2)).
4. Zum Verwenden der Seitengitter lesen und beachten Sie das Kapitel Bedienung Abschnitt **Seitengitter**.

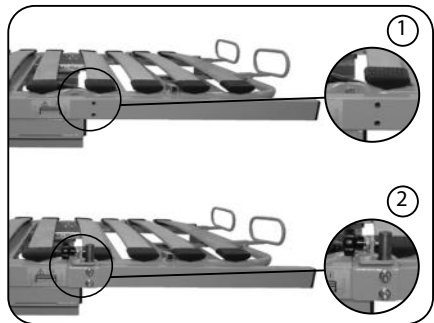


Abb. 6.5.02 - Montage Seitengitteraufnahme



Bei der Verwendung von zwei Seitengittern müssen Sie eine schmalere Matratze verwenden.