




Lösungsvarianten zum Sitzen

Viele Größen, verschiedene Bezüge für unterschiedliche Gewichte und Anforderungen

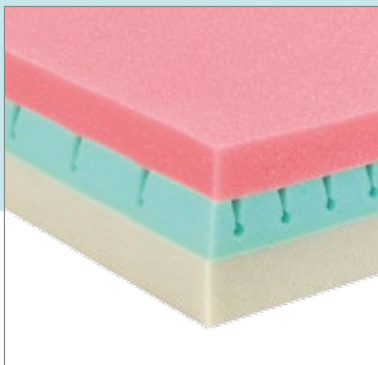

aks-Antidekubitus Sitzkissen

Der Rollstuhl: Mobilität für Menschen mit Handicap

„Im Alltag von stark mobilitätseingeschränkten Menschen ist der Rollstuhl ein sehr nützliches Hilfsmittel. Er verhilft ihnen zu einem erhöhten Bewegungsradius und somit zu mehr Selbstständigkeit. Letzten Endes wird damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht.“

Der Rollstuhl überbrückt Behinderungen

In der Bundesrepublik Deutschland nutzen mehr als eineinhalb Millionen Menschen einen Rollstuhl - dauerhaft oder zeitweise. Diese Betroffenenengruppe besteht aus etwa gleichen Teilen von Senioren und Menschen mit körperlichen Behinderungen.“*

So unterschiedlich wie die Betroffenen selbst, sind auch Ihre Anforderungen und Erwartungen an den Rollstuhl und das Rollstuhlsitzkissen. aks hat deshalb kontinuierlich diesen Produktbereich ausgebaut und bietet heute eine breite Produktpalette.

*Quelle: *Stiftung MyHandicap gemeinnützige GmbH*



**PROPHY-
LAXE**

aks-maxisit

Die Basisversorgung für Risikopatienten

Dieses Schaumstoff-Würfelsitzkissen ist für die Versorgung von Rollstuhlfahrern geeignet, die mobil genug sind, sich immer wieder anders zu positionieren. Die richtige Stauchhärte des Kissens und die Würfelstruktur gewährleisten eine gleichbleibend gute Druckverteilung und geringe Scherkräfte. Sitzkissen inklusive Sitzkissenbezug inkoair®.

Patientengewicht 40-120 kg
Abmessung 42 x 42 x 9 cm
Dekubitusprophylaxe

HMV-Nummer
aks-maxisit - 11.11.01.3059

Bestellnummer
aks-maxisit - 04050



**PROPHY-
LAXE**

aks-multisit

Für Benutzer mit niedrigem Körpergewicht oder wenig Mobilität

Da diese Menschen eine Sitzfläche mit geringer Stauchhärte benötigen, wird bei diesem Rollstuhlsitzkissen eine Kombination aus entsprechenden Schaumstoffwürfeln und einer Wanne aus festem Schaumstoff eingesetzt. Die Wanne sorgt für die notwendige Unterstützung beim Sitzen. Zwei Mulden an der Vorderseite führen die Oberschenkel. Sitzkissen inklusive Sitzkissenbezug inkoair®.

Patientengewicht 40-90 kg
Abmessung 42 x 42 x 10 cm
Dekubitusprophylaxe

Bestellnummer
aks-multisit - 04350



**BIS
GRAD I
EPUAP**

aks-gelsit

Bewährt, robust, langlebig

Gelkissen genießen bei Rollstuhlfahrern mit Eigenbewegung eine hohe Beliebtheit. Sie zeichnen sich durch eine geringe Dicke aus und vergrößern so die Gesamtsitzhöhe nur unwesentlich. Sitzkissen inklusive Sitzkissenbezug inkoair®.

Patientengewicht 40-100 kg

Abmessungen 40 x 40 x 2,5 cm/42 x 45 x 2,5 cm

Zur Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Grad I (nach EPUAP)

HMV-Nummer

aks-gelsit - 11.39.02.0009

Bestellnummern


40 x 40 x 2,5 cm - 04150

42 x 45 x 2,5 cm - 04151



aks-variosit 8/10


Zwei-schichtiges Schaumstoff-Würfelsitzkissen zur individuellen Versorgung im Rollstuhl

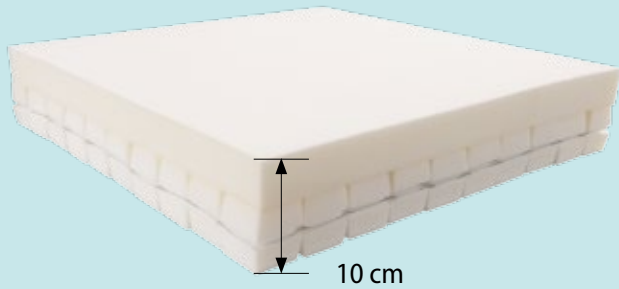

Die Vorteile des aks-variosit 8/10

- aks-variosit 8/10 besitzt eine Sitzfläche aus PU-Schaumstoff
- Schaumstoffwürfel von 5 x 5 cm Größe, ermöglichen eine vielseitige Anzahl an lieferbaren Sitzkissen Größen und somit eine individuelle Versorgung mit dem passenden Sitzkissen.
- zusätzliche Druckentlastung durch die gezielte Würfelenahme auf der Unterseite (durch „Hohlagerung“) an besonders gefährdeten Gesäßbereichen, z.B. im Bereich der Sitzbeinhocker
- Die äußeren Würfel sind für den unterstützenden Sitzkomfort mit der oberen Schaumstoffschicht verbunden.
- Zur Stabilisierung der Würfel trägt ein Kunststoffgitter bei, zudem vereinfacht es die Würfelenahme.
- Die Kissen unterscheiden sich in der Gesamthöhe von 8 cm oder 10 cm.
- Inklusive wasserundurchlässigem inkoair®-Sitzkissenbezug zum Schutz des Sitzkissens z. B. bei Inkontinenz.

**BIS
GRAD IV
EPUAP**

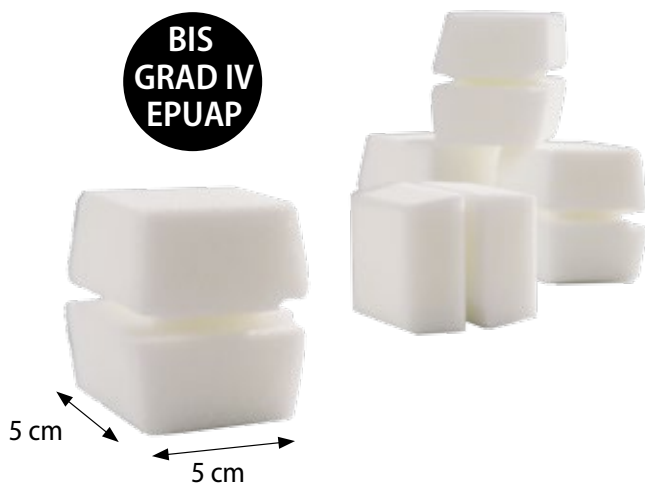

Option

- aks-3D air-Sitzkissenbezug zur verbesserten Luftzirkulation

Patientengewichte

aks-variosit 8, **20-80 kg**

aks-variosit 10, **70-130 kg**


Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Grad IV (nach EPUAP)

HMV-Nummer

aks-variosit 8 - 11.39.01.3013

aks-variosit 10 - 11.39.01.3012

Bestellnummern und Abmessungen siehe Seite 95ff

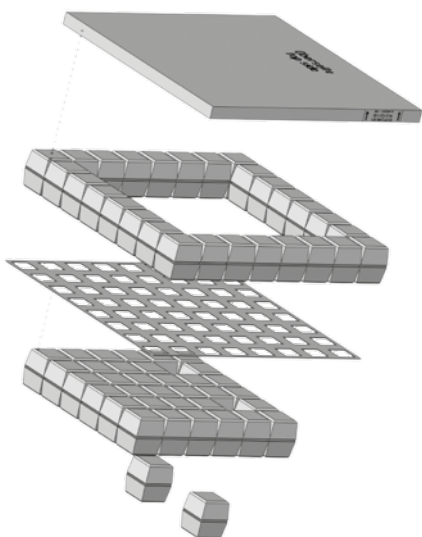




aks-variosit memo 8/10

Zwei-schichtiges Schaumstoff-Würfelsitzkissen zur individuellen Versorgung im Rollstuhl

Die Vorteile des aks-variosit memo 8/10

- die Sitzfläche des aks-variosit memo 8/10 besteht aus hochwertigem viscoelastischem Schaumstoff
- Die 5 x 5 cm große Schaumstoffwürfel ermöglichen eine vielseitige Anzahl an lieferbaren Sitzkissengrößen und somit eine individuelle Versorgung mit dem passenden Sitzkissen.
- Zusätzliche Druckentlastung wird durch die gezielte Würfelenahme auf der Unterseite durch quasi Hohllagerung am besonders gefährdeten Gesäßbereich, z. B. im Bereich der Sitzbeinhocker, erreicht.
- Die äußeren Würfel sind für den unterstützenden Sitzkomfort mit der oberen Schaumstoffschicht verbunden.
- Zudem trägt ein Kunststoffgitter zur Stabilisierung bei und vereinfacht die Handhabung der Würfelenahme.
- Die Kissen unterscheiden sich in der Gesamthöhe von 8 cm oder 10 cm.
- Inklusive wasserundurchlässigem inkoair®-Sitzkissenbezug zum Schutz des Sitzkissens z. B. bei Inkontinenz.

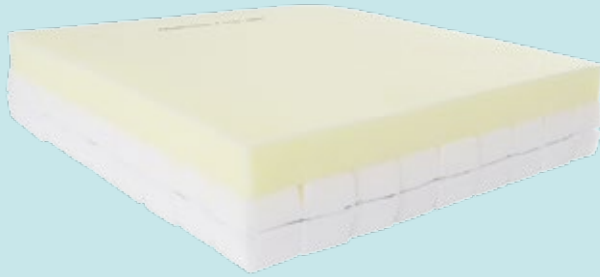

Option

- aks-3D air-Sitzkissenbezug zur verbesserten Luftzirkulation

Patientengewichte

aks-variosit memo 8, 20-80 kg

aks-variosit memo 10, 20-140 kg

Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Grad IV (nach EPUAP)



HMV-Nummer

aks-variosit memo 8/10 - in Vorbereitung



Bestellnummern und Abmessungen siehe Seite 95ff

aks-therasit 8/10

Innovative Schaumstoffsitzkissen mit dreischichtigem Aufbau



**BIS
GRAD IV
EPUAP**

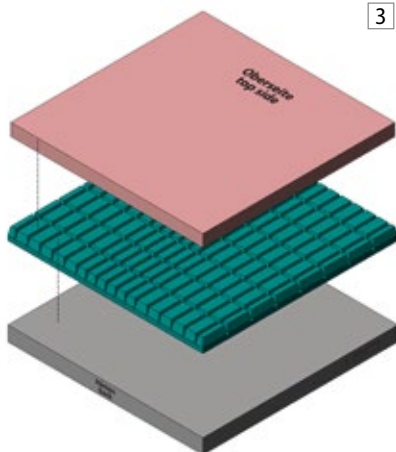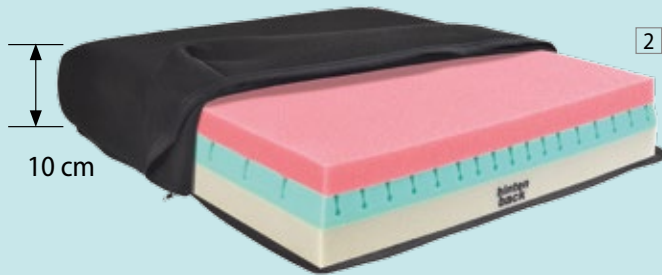

Die dreischichtigen Schaumstoffsitzkissen bieten eine gute Druckentlastung mit einer großen Auswahl an Sitzkissenabmessungen. Die Sitzkissen sind für die Dekubitusprophylaxe und auch für die -therapieunterstützung bis einschließlich Grad IV nach EPUAP geeignet.

Die Vorteile der Sitzkissen aks-therasit 8/10

- Innovativer, dreischichtiger Aufbau mit komplexen Einschnitten in der mittleren Schicht schafft eine gute Druckentlastung sowie Scherkraftminderung. (Bild 3)
- Durch die Einschnitte ist zusätzlich eine optimale Mikroklimaregulierung im Sitzkissen gewährleistet.
- Die nötige Stabilität für das sichere Sitzen im Rollstuhl ist durch die feste untere Schaumstoffschicht gegeben.
- Die beiden Sitzkissen sind in vielen unterschiedlichen Größen und in zwei Höhen (8 cm/10 cm) erhältlich.
- Es wird zudem ein großer Gewichtsreich abgedeckt. Personen von 20 bis 80 kg können das aks-therasit 8 Sitzkissen verwenden. Das aks-therasit 10 Sitzkissen ist für den gesamten Gewichtsreich von 20 bis 140 kg einsetzbar.
- Inklusive wasserundurchlässiger inkoair®-Sitzkissenbezug, optimaler Schutz des Sitzkissens, z.B. bei Personen mit Inkontinenz. (Bild 1)

Option

- aks-3D air-Sitzkissenbezug zur verbesserten Luftzirkulation zur Verfügung. (Bild 2)

Patientengewichte

aks-therasit 8, 20-80 kg

aks-therasit 10, 20-140 kg

Dekubitusprophylaxe und -therapieunterstützung bis Grad IV (nach EPUAP)

HMV-Nummern

aks-therasit 8 - 11.39.01.1047

aks-therasit 10 - 11.39.01.1046

Bestellnummern und Abmessungen siehe Seite 95ff

Technische Daten Sitzkissen

Produkt	Abmessung (B x T x H)	Sitzkissen- bezug	Patienten- gewicht	Dekubitusgrad nach EPUAP	HMV-Nr.	Bestellnr.
aks-maxisit	42 x 42 x 9 cm	inkoair®	40-120 kg	Prophylaxe	11.11.01.3059	04050
aks-multisit	42 x 42 x 10 cm	inkoair®	40-90 kg	Prophylaxe	-	04350
aks-gelsit	40 x 40 x 2,5 cm	inkoair®	40-100 kg	Grad I	11.39.02.0009	04150
	42 x 45 x 2,5 cm				11.39.02.0009	04151
aks-variosit 8	35 x 35 x 8 cm	inkoair®	20-80 kg	Grad IV	11.39.01.3013	40340
	35 x 40 x 8 cm				11.39.01.3013	40341
	40 x 40 x 8 cm				11.39.01.3013	40300
	40 x 45 x 8 cm				11.39.01.3013	40301
	45 x 45 x 8 cm				11.39.01.3013	40302
	50 x 40 x 8 cm				11.39.01.3013	40303
	50 x 45 x 8 cm				11.39.01.3013	40304
aks-variosit 8	35 x 35 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Grad IV	-	40360
	35 x 40 x 8 cm				-	40361
	40 x 40 x 8 cm				-	40320
	40 x 45 x 8 cm				-	40321
	45 x 45 x 8 cm				-	40322
	50 x 40 x 8 cm				-	40323
	50 x 45 x 8 cm				-	40324
aks-variosit 10	35 x 35 x 10 cm	inkoair®	70-130 kg	Grad IV	11.39.01.3012	40314
	35 x 40 x 10 cm				11.39.01.3012	40315
	40 x 40 x 10 cm				11.39.01.3012	40311
	40 x 45 x 10 cm				11.39.01.3012	40312
	45 x 45 x 10 cm				11.39.01.3012	40313
	50 x 40 x 10 cm				11.39.01.3012	40305
	50 x 45 x 10 cm				11.39.01.3012	40306
	50 x 50 x 10 cm				11.39.01.3012	40307
	55 x 40 x 10 cm				11.39.01.3012	40308
	55 x 45 x 10 cm				11.39.01.3012	40309
	55 x 50 x 10 cm				11.39.01.3012	40310
aks-variosit 10	35 x 35 x 10 cm	aks-3D air	70-130 kg	Grad IV	-	40334
	35 x 40 x 10 cm				-	40335
	40 x 40 x 10 cm				-	40331
	40 x 45 x 10 cm				-	40332
	45 x 45 x 10 cm				-	40333
	50 x 40 x 10 cm				-	40325
	50 x 45 x 10 cm				-	40326
	50 x 50 x 10 cm				-	40327
	55 x 40 x 10 cm				-	40328
	55 x 45 x 10 cm				-	40329
	55 x 50 x 10 cm				-	40330

Produkt	Abmessung (B x T x H)	Sitzkissen- bezug	Patienten- gewicht	Dekubitusgrad nach EPUAP	HMV-Nr.	Bestellnr.
aks-variosit memo 8	35 x 35 x 8 cm	inkoair®	20-80 kg	Grad IV	in Bearbeitung	40500
	35 x 40 x 8 cm				in Bearbeitung	40501
	40 x 40 x 8 cm				in Bearbeitung	40502
	40 x 45 x 8 cm				in Bearbeitung	40503
	45 x 45 x 8 cm				in Bearbeitung	40504
	50 x 40 x 8 cm				in Bearbeitung	40505
	50 x 45 x 8 cm				in Bearbeitung	40506
aks-variosit memo 8	35 x 35 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Grad IV	-	40520
	35 x 40 x 8 cm				-	40521
	40 x 40 x 8 cm				-	40522
	40 x 45 x 8 cm				-	40523
	45 x 45 x 8 cm				-	40524
	50 x 40 x 8 cm				-	40525
	50 x 45 x 8 cm				-	40526
aks-variosit memo 10	35 x 35 x 10 cm	inkoair®	20-140 kg	Grad IV	in Bearbeitung	40507
	35 x 40 x 10 cm				in Bearbeitung	40508
	40 x 40 x 10 cm				in Bearbeitung	40509
	40 x 45 x 10 cm				in Bearbeitung	40510
	45 x 45 x 10 cm				in Bearbeitung	40511
	50 x 40 x 10 cm				in Bearbeitung	40512
	50 x 45 x 10 cm				in Bearbeitung	40513
	50 x 50 x 10 cm				in Bearbeitung	40514
	55 x 40 x 10 cm				in Bearbeitung	40515
	55 x 45 x 10 cm				in Bearbeitung	40516
	55 x 50 x 10 cm				in Bearbeitung	40517
aks-variosit memo 10	35 x 35 x 10 cm	aks-3D air	20-140 kg	Grad IV	-	40527
	35 x 40 x 10 cm				-	40528
	40 x 40 x 10 cm				-	40529
	40 x 45 x 10 cm				-	40530
	45 x 45 x 10 cm				-	40531
	50 x 40 x 10 cm				-	40532
	50 x 45 x 10 cm				-	40533
	50 x 50 x 10 cm				-	40534
	55 x 40 x 10 cm				-	40535
	55 x 45 x 10 cm				-	40536
	55 x 50 x 10 cm				-	40537
aks-therasit 8	35 x 35 x 8 cm	inkoair®	20-80 kg	Grad IV	11.39.01.1047	40440
	35 x 40 x 8 cm				11.39.01.1047	40441
	40 x 40 x 8 cm				11.39.01.1047	40400
	40 x 45 x 8 cm				11.39.01.1047	40401
	45 x 45 x 8 cm				11.39.01.1047	40402
	50 x 40 x 8 cm				11.39.01.1047	40403
	50 x 45 x 8 cm				11.39.01.1047	40404
aks-therasit 8	35 x 35 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Grad IV	-	40460
	35 x 40 x 8 cm				-	40461
	40 x 40 x 8 cm				-	40420
	40 x 45 x 8 cm				-	40421
	45 x 45 x 8 cm				-	40422
	50 x 40 x 8 cm				-	40423
	50 x 45 x 8 cm				-	40424

Produkt	Abmessung (B x T x H)	Sitzkissen-bezug	Patienten-gewicht	Dekubitusgrad nach EPUAP	HMV-Nr.	Bestellnr.
aks-therasit 10	35 x 35 x 10 cm	inkoair®	20-140 kg	Grad IV	11.39.01.1046	40414
	35 x 40 x 10 cm				11.39.01.1046	40415
	40 x 40 x 10 cm				11.39.01.1046	40411
	40 x 45 x 10 cm				11.39.01.1046	40412
	45 x 45 x 10 cm				11.39.01.1046	40413
	50 x 40 x 10 cm				11.39.01.1046	40405
	50 x 45 x 10 cm				11.39.01.1046	40406
	50 x 50 x 10 cm				11.39.01.1046	40407
	55 x 40 x 10 cm				11.39.01.1046	40408
	55 x 45 x 10 cm				11.39.01.1046	40409
55 x 50 x 10 cm	11.39.01.1046	40410				
aks-therasit 10	35 x 35 x 10 cm	aks-3D air	20-140 kg	Grad IV	-	40434
	35 x 40 x 10 cm				-	40435
	40 x 40 x 10 cm				-	40431
	40 x 45 x 10 cm				-	40432
	45 x 45 x 10 cm				-	40433
	50 x 40 x 10 cm				-	40425
	50 x 45 x 10 cm				-	40426
	50 x 50 x 10 cm				-	40427
	55 x 40 x 10 cm				-	40428
	55 x 45 x 10 cm				-	40429
55 x 50 x 10 cm	-	40430				

inkoair®-Sitzkissen-Ersatzbezüge	Abmessung (B x T x H)	Bestellnr.
für maxisit, multisit	42 x 42 x 9/10 cm	40150
für aks-gelsit	40 x 40 x 2,5 cm	41160
für aks-gelsit	42 x 45 x 2,5 cm	41161

inkoair®-Sitzkissen-Ersatzbezüge für viscosit M, L, XL, variosit 8/10, variosit memo 8/10, therasit 8/10			
Abmessung (B x T x H)	Bestellnr.	Abmessung (B x T x H)	Bestellnr.
35 x 35 x 8 cm	49229	35 x 35 x 10 cm	49235
35 x 40 x 8 cm	49230	35 x 40 x 10 cm	49236
40 x 40 x 8 cm	49213	40 x 40 x 10 cm	49226
40 x 45 x 8 cm	49214	40 x 45 x 10 cm	49227
45 x 40 x 8 cm	49215	45 x 45 x 10 cm	49228
45 x 45 x 8 cm	49216	50 x 40 x 10 cm	49220
50 x 40 x 8 cm	49217	50 x 45 x 10 cm	49221
50 x 45 x 8 cm	49218	50 x 50 x 10 cm	49222
		55 x 40 x 10 cm	49223
		55 x 45 x 10 cm	49224
		55 x 50 x 10 cm	49225

3D air-Sitzkissen-Ersatzbezüge für viscosit M, L, XL, variosit 8/10, variosit memo 8/10, therasit 8/10			
Abmessung (B x T x H)	Bestellnr.	Abmessung (B x T x H)	Bestellnr.
35 x 35 x 8 cm	49231	35 x 35 x 10 cm	49233
35 x 40 x 8 cm	49232	35 x 40 x 10 cm	49234
40 x 40 x 8 cm	49200	40 x 40 x 10 cm	49250
40 x 45 x 8 cm	49201	40 x 45 x 10 cm	49251
45 x 40 x 8 cm	49202	45 x 45 x 10 cm	49252
45 x 45 x 8 cm	49203	50 x 40 x 10 cm	49207
50 x 40 x 8 cm	49204	50 x 45 x 10 cm	49208
50 x 45 x 8 cm	49205	50 x 50 x 10 cm	49209
50 x 50 x 8 cm	49206	55 x 40 x 10 cm	49210
		55 x 45 x 10 cm	49211
		55 x 50 x 10 cm	49212