



Umfangreiches Gurtprogramm zum Heben und Transferieren für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche



Netzstoff



Rückenverstärkung



Gurtschlaufen überkreuzt eingehangen



Griff zur Unterstützung beim Manövrieren



Farbig gekennzeichnete Gurtschlaufen



Wadengurt

aks-Liftergurte

aks-Liftergurte sind mit verstärkten Nähten gearbeitet und geprüft, so dass alle Gurte für Hebelifter bis 250 kg Maximallast eingesetzt werden können.

Zum Einsatz kommen verschiedene Materialien: Polyesterstoff für die Verwendung im Trockenbereich, spezieller wasserdurchlässiger und schnelltrocknender Polyester-Netzstoff für die Benutzung im Nassbereich, extrem reißfeste Gurtbänder aus Polyester, Polsterung aus verschiedenen Schaumstoffen um Druckspitzen bzw. ein Einschneiden des Liftergurtes in die Haut zu vermeiden und um den Körper des Patienten zusätzlich zu stützen und/oder den Tragekomfort zu erhöhen.

Zur Stabilisierung von Patienten sind einige Gurte im Rückenbereich mit integrierten Aluminiumleisten zur Rückenverstärkungen ausgestattet. Bei verschiedenen

Gurten bieten wir zur Unterstützung von Patienten mit wenig Kopf- und Nackenstabilität eine separate, anklettbare Kopfstütze an. Unterschiedlich farbig gekennzeichnete Schlaufen der Gurtbänder erleichtern die Zuordnung der richtigen Einhängeweise beim jeweiligen Gurtband.

Alle Gurte sind bei 60° C waschbar.



Gurt ist auch im Nassbereich einsetzbar



Gurt ist teils auch bei Beinamputationen und Teilamputationen einsetzbar, abhängig von der Konstitution des Patienten



Kompatibilität

Unsere Liftergurte für Hebelifter sind bei allen aks-Hebeliftern und bei verschiedenen Liftern von anderen Herstellern einsetzbar. Beachten Sie unsere Kompatibilitätserklärung für Liftergurte, diese finden Sie auf unserer Website www.aks.de

Liftergurte für Hebelheber/Deckenlifter



aks-Standardgurt
Seite 34



aks-Badegurt
Seite 35



aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze
Seite 36



aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze
Seite 37



aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex
Seite 38



aks-Hygienegurt
Seite 39



aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung
Seite 40



aks-Komfort-Hygienegurt
Seite 41



aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze
Seite 42



aks-Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze
Seite 43



aks-Universal-Komfortgurt
Seite 44



aks-Universal-Netzgurt
Seite 45



aks-Universalgurt
Seite 45



aks-Liegendtransportgurt
Seite 46



aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme
Seite 47



aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme zum Baden
Seite 47

Liftergurte für Hebelheber/Deckenheber



aks-Aufrichtgurt
Seite 48



aks-Schnelltransportgurt mit
Brustschlaufe
Seite 49



aks-Schnelltransportgurt mit
Brustschlaufe zum Baden
Seite 49



goliath® Gurt
Seite 50

Liftergurte bis XXL

Zubehör für Liftergurte für Hebelheber/Deckenheber



aks-Kopfstütze
Seite 51



aks-Verlängerungsschlaufen
Seite 51



aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für
Aufstehlifter (dual®)
Seite 52



aks-Wadengurt für Aufstehlifter
Seite 52



aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe
für Aufstehlifter torino® II und
torneo® compact
Seite 53

Liftergurte für Aufstehlifter



aks-Standardgurt


Bereits die Materialqualität und die Verarbeitung dieses preisgünstigen Modells entsprechen den alltäglichen Anforderungen. Voraussetzung ist eine Mitwirkung des Patienten, der im Nacken- und Schulterbereich noch stabil ist. Mit diesem Gurt ist die Aufnahme vom Boden möglich. Die Beinstützen sind mit zusätzlichen Gewebeschichten gefertigt und mit einer Polsterung zur Verstärkung versteppt. Zudem gewährleistet diese Verstärkung einen faltenfreien Sitz mit hoher Druckminderung an den Oberschenkeln. Die Griffschleife an der Außenseite unterstützt die Pflegeperson beim Positionieren des Patienten. Zur Unterstützung des Kopf- und Nackenbereiches kann optional die aks-Kopfstütze eingeklettet werden (siehe Bild unten), sie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001


Bestellnummern

- Größe S - 88700
- Größe M - 88701
- Größe L - 88702
- Größe XL - 88703
- Größe XXL - 88704

Kopfstütze
(optional) - 88798

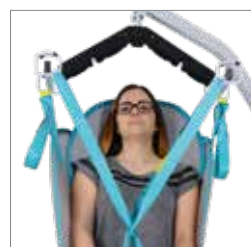

aks-Standardgurt mit eingekletteter Kopfstütze (optional)

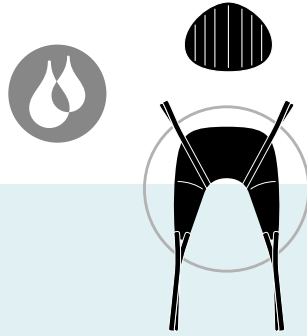

aks-Badegurt

Dieser Gurt, aus einem äußerst reißfesten Polyester-netz, nimmt kaum Wasser auf, trocknet daher sehr schnell wieder ab und wurde speziell für den Einsatz im Bad bzw. Nassbereich konzipiert. Die Beinstützen sind mit Schaumstoff aufgepolstert. Diese Verstärkung gewährleistet einen faltenfreien Sitz mit hoher Druckminderung für die Oberschenkel.

Mit diesem Gurt können Sie Patienten vom Boden liegend aufnehmen, Voraussetzung ist eine Mitwirkung des Patienten, der im Nacken und Schulterbereich noch stabil ist. Die Griffschleife an der Außenseite unterstützt die Pflegeperson beim Positionieren des Patienten. Zur Unterstützung des Kopf- und Nackenbereiches kann optional die aks-Kopfstütze eingeklettet werden, sie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001


Bestellnummern

Größe S - 88715
 Größe M - 88716
 Größe L - 88717
 Größe XL - 88718
 Größe XXL - 88719

Kopfstütze
 (optional) - 88798



→
Griff-
schleife

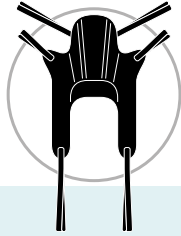

aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze


Als Weiterentwicklung des Standardgurtes bietet dieser Gurt eine Reihe von Vorteilen: durch die spezielle Rückenverstärkung, die nahtlos in die Kopfstütze übergeht und die herausnehmbaren Versteifungen aus Aluminium, wird der Rücken- und Kopfbereich gestützt und gerade gehalten. Neben den Bein- und Schulterschlaufen bieten zusätzlich 4-fach verstellbare Kopfschlaufen die Möglichkeit, den Gurt individuell dem Patienten anzupassen. Dieser Vorteil gibt mehr Sicherheit und Halt. Das Netz im Gesäßbereich verhindert ein Herausgleiten des Patienten. Die spezielle Form der Beinstützen erleichtert die schnelle und sichere Aufnahme des Patienten. Der gesamte Körper wird stabilisiert und gestützt. Dieser Gurt ist besonders für Patienten mit Einschränkung des Stütz- und Bewegungsapparats im Oberkörper geeignet.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

Größe S - 88705
Größe M - 88706
Größe L - 88707



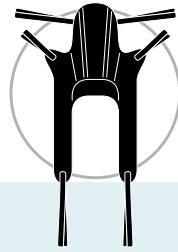

aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze

Der Gurt aus Polyesternetz trocknet schnell und unterstützt insbesondere bei der Körperpflege im Bad. Siehe auch die Beschreibung zum aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001


Bestellnummern

Größe S - 88720

Größe M - 88721

Größe L - 88722



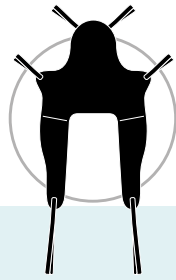

Wasser-Resistenz-Badegurt mit Kopfstütze Flex

Badgurt mit integrierter Kopfstütze, die nahtlos an den Rückenbereich anschließt. Patienten mit wenig Stabilität im Halsbereich können so schonend transferiert werden. Der Gurt besteht aus einem äußerst reißfesten Polyester-netz, das kaum Wasser aufnimmt und schnell trocknet. Er wurde speziell für den Einsatz im Bad bzw. Nassbe-reich konzipiert.


Die besonders breiten Beinstützen sind mit Schaumstoff ausgepolstert. Diese Polsterung gewährleistet einen faltenfreien Sitz mit hoher Druckminderung für die Oberschenkel. Die Aufnahme erfolgt standardmäßig im Sitzen. Eine Aufnahme aus dem Bett oder vom Boden ist ebenfalls möglich. Der Transfer erfolgt im Sitzen.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

- Größe S - 88791
- Größe M - 88792
- Größe L - 88793
- Größe XL - 88794
- Größe XXL - 88795



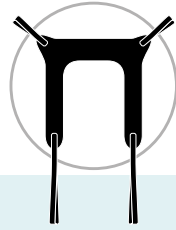

aks-Hygienegurt

Der kompakte Zuschnitt und der große Ausschnitt im Gesäßbereich ermöglichen ein einfaches und schnelles Anlegen des Gurtes. Der Patient kann anschließend sehr gut auf eine Toilette gesetzt werden, da im Gesäßbereich der Unterkörper frei bleibt. Mehr Komfort für den Patienten durch Auspolsterung unter den Armen, Beinpolsterung sowie Griffschlaufen am Gurt zum Bewegen des Patienten.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

Größe S - 88730


Größe M - 88731

Größe L - 88732

Größe XL - 88733

Größe XXL - 88734



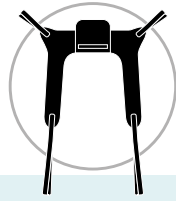

aks-Hygienebelt mit Rückenverstärkung

Für mehr Unterstützung und Stabilität im aks-Hygienebelt wurde der aks-Hygienebelt mit Rückenverstärkung entwickelt. Der höher geschnittene und verstärkte Rücken des Liftergurtes stützt den Patienten im Rücken. Der Achselbereich ist gepolstert und sorgt für einen angenehmen Sitz im Gurt. Die 4-fach verstellbaren Bein- und Schulterschlaufen bieten die Möglichkeit, den Gurt individuell an den Patienten anzupassen. Die spezielle Form der Beinstützen erleichtert die schnelle und sichere Aufnahme des Patienten. Der Patient wird stabilisiert und gestützt, muss jedoch im Nacken- und Schulterbereich stabil sein. Durch den großen Ausschnitt im Gesäßbereich bleibt der Intimbereich frei, so kann der Patient sehr gut auf die Toilette gesetzt werden. Eine Griffschleife am Rücken erleichtert das Manövrieren des Patienten.


Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

- Größe S - 88786
- Größe M - 88787
- Größe L - 88788
- Größe XL - 88789
- Größe XXL - 88790



Griff-
schleife

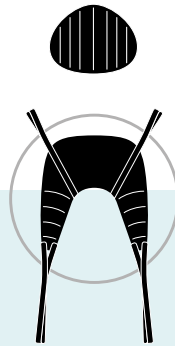

aks-Komfort-Hygienegurt

Die Weiterentwicklung des aks-Hygienegurts zum komfortablen Gurt für den Toilettengang. Dieser Gurt bietet noch mehr Unterstützung im Rückenbereich und Sitzkomfort als der aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung. Er besitzt besonders breite, gepolsterte Beinstützen. Bei Bedarf kann zusätzlich eine Kopfstütze angebracht werden, sie ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann optional erworben werden.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

Größe S - 88735

Größe M - 88736

Größe L - 88737

Größe XL - 88738


Größe XXL - 88739

Kopfstütze

(optional) - 88798



→
Griff-
schleife

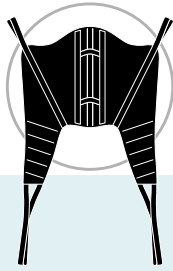

aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze


Der eigens für Patienten mit wenig Stabilität im Rumpfbereich entwickelte Gurt bietet dem gesamten Körper eine komfortable Unterstützung. Der hohe Rückenteil mit herausnehmbaren Versteifungen aus Aluminium sowie die integrierte Kopfstütze erhöhen die Sicherheit bei der Anwendung und Bequemlichkeit. Die eingearbeitete Polsterung der Beinstützen erhöht den Sitzkomfort druckempfindlicher Patienten. Unterschiedlich farbig gekennzeichnete Schlaufen ermöglichen verschiedene Einstellungen des Gurtes und dadurch eine variable Positionierung. Mehrere Griffschlaufen an der Außenseite unterstützen die Pflegeperson beim Manövrieren des Patienten.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

- Größe S - 88710
- Größe M - 88711
- Größe L - 88712
- Größe XL - 88713
- Größe XXL - 88714



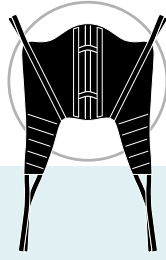

aks-Komfortbadegurt mit integrierter Kopfstütze

Dieser Gurt besitzt ein ähnliches Schnittmuster wie der aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze und ist aufgrund der Netzstruktur des Materials wasser-durchlässig und trocknet schnell. Er ist speziell für den Nassbereich entwickelt worden.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

Größe S - 88725

Größe M - 88726

Größe L - 88727


Größe XL - 88728

Größe XXL - 88729



→ Griff-
schlaufen



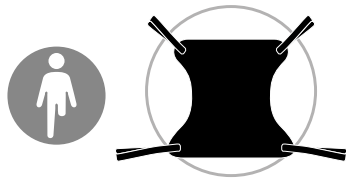

aks-Universal-Komfortgurt

Der Universal-Komfortgurt besteht aus flexiblen Gewebestoffen, die sich dem Körper des Patienten anpassen. Dieser Gurt ist für eine Anwendung im Trockenbereich vorgesehen und ist für die Aufnahme von Patienten mit Beinamputationen geeignet. Im Kopf-/Schulterbereich ist eine Griffeschlaufe zum Manövrieren des Patienten angebracht.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern


Größe M - 88756

Größe L - 88757

Größe XL - 88758

Größe XXL - 88759



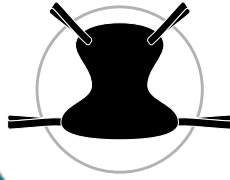

aks-Universal-Netzgurt


Der Universal-Netzgurt bietet viel Flexibilität: die Schulter-schlaufen sind zur Erreichung der optimalen Position 3-fach, die Beinschlaufen sogar 4-fach verstellbar. Optimaler Sitzkomfort bei Verwendung des aks-Tandembügels (s. Bild). Vier Griffschlaufen am Gurt helfen bei der Positionierung des Patienten während des Transfervorganges. Das einlagige Netzmaterial ist gut wasserdurchlässig und trocknet schnell, ideal für die Anwendungen im Nassbereich (Baden). Dieser Gurt ist zudem insbesondere für Patienten mit Beinamputationen geeignet.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001



Bestellnummern

Größe S - 88760
Größe M - 88761
Größe L - 88762
Größe XL - 88763
Größe XXL - 88764

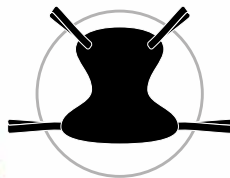

aks-Universalgurt Flex

Der Universalgurt Flex ist dem Universal-Netzgurt ähnlich. Dabei wurden bewusst die Griffschlaufen weggelassen, so dass der Gurt eine Zeit unter dem Patienten verbleiben kann (z. B. im Rollstuhl, Sitzschale). Dadurch ist es nicht notwendig den Gurt direkt nach dem Transfer zu entfernen.


Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001



Bestellnummern

Größe S - 88766
Größe M - 88767
Größe L - 88768
Größe XL - 88769
Größe XXL - 88770



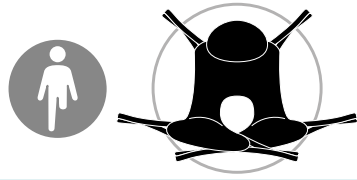

aks-Liegendtransportgurt

Mit diesem Gurt und dem aks-Tandembügel (s. Bild) können auch schwierige Transferprobleme gelöst werden. Selbst der Transfer von Patienten mit Hüft- oder Rückenproblemen sowie mit Amputationen unterhalb des Kniegelenks, kann hiermit problemlos durchgeführt werden. Die Beinstützen sind zusätzlich mit Schaumstoff gepolstert. So werden die Oberschenkel sicher und bequem gestützt. Die durch Klettband fixierbare Kopfstütze (inklusive) gibt zusätzlichen Halt. Eine Griffschleife am Tuch im Kopfbereich erleichtert das Positionieren und Bewegen des Patienten.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

Größe M - 88746

Größe L - 88747


Größe XL - 88748

Größe XXL - 88749



aks-Liegendtransportgurt für Tandembügel

Griffschleife

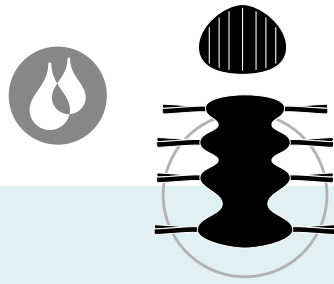

aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme/ ~ zum Baden

In Verbindung mit dem speziellen Liegendtransportbügel mit 8-Punktaufnahme garantiert dieser Gurt einen absolut schonenden Transfer auch von Schmerzpatienten. Optional kann eine Kopfstütze per Klettband fixiert werden und zusätzlich Halt im Kopf und Nackenbereich geben. Der aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme zum Baden aus Netzmaterial ist wasserdurchlässig, trocknet schnell und ist damit für den Einsatz im Nassbereich optimal.


Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern	~ zum Baden
Größe M - 88751	Größe M - 88777
Größe L - 88752	Größe L - 88778
Größe XL - 88753	Größe XL - 88779
Größe XXL - 88754	Größe XXL - 88780

Kopfstütze (optional) - 88798

aks-Liegendtransportgurt für Transportbügel mit 8-Punktaufnahme



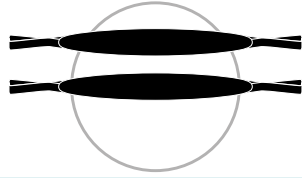

aks-Aufrichtgurt

Der Aufrichtgurt für aks-Standardlifter besteht aus zwei einzelnen Gurten mit unterschiedlich farbig gekennzeichneten, 3-fach verstellbaren Schlaufen. Er eignet sich besonders für den schnellen Transfer von Patienten, die über genügend Muskelkraft vom Schulterbereich über Oberkörper bis hin zu den Oberschenkeln verfügen. Der Gurt zeichnet sich durch einfache und schnelle Anwendung aus und fördert zudem den Erhalt der Mobilität.

Er wird zudem gerne bei selbstständig ausgeführten Transfers mit einem Deckenlift eingesetzt.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummer
Größe M - 88765





aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe

Für den schnellen und unkomplizierten Transfer von Patienten mit genügend Eigenstabilität ist dieser Gurt geradezu prädestiniert. Er verfügt über eine integrierte, gepolsterte Rückenverstärkung, eine Achselpolsterung und eine Brustschlaufe, die den Patienten ein sicheres Gefühl gibt. Der Gurt kann auch als Hygienegurt genutzt werden. Die Griffschlaufe im Rückenbereich erleichtert das Manövrieren des Patienten.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

Größe S - 88740
Größe M - 88741
Größe L - 88742



aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe zum Baden


Der aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe zum Baden besitzt ein ähnliches Schnittmuster und Aufbau wie der aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe. Für einen höheren Komfort, zur besseren Druckverteilung an den Oberschenkeln, besitzt er breitere Beinstützen. Er eignet sich, aufgrund der wasserdurchlässigen und schnell trocknenden Netzstruktur des Materials, speziell für den Nassbereich. Eine Griffschlaufe im Rückenbereich des Gurtes erleichtert das Manövrieren des Patienten.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

Größe S - 88771
Größe M - 88772
Größe L - 88773



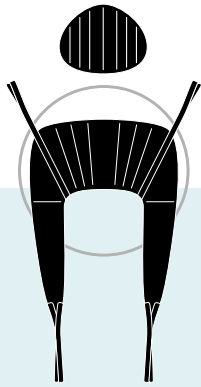

goliath® Gurt

Der Liftergurt für schwer- gewichtige Personen

Die goliath® Gurte gehören zu den flexiblen Körperstützsystemen, deren Gewebestoffe sich optimal dem Körper des Patienten anpassen. Die extrem reißfesten Polyestergurte dienen als Verstärkung. Schulterschlaufen sind 5-fach, Beinschlaufen 4-fach verstellbar. Der Rückenbereich und die Beinstützen bieten eine zusätzliche Besonderheit. Sie sind mit einem sog. druckelastischen 3D-Textil gepolstert. Zwei Gewebelagen werden durch eine Polsterschicht in einem vordefinierten Abstand gehalten. Darin bildet sich ein Mikroklima, das thermo- und feuchtigkeitsregulierend wirkt. Grundsätzlich wird dieser hochwertige Gurt mit dem goliath® Lifter in der Grundversorgung adipöser Menschen bis zu max. 250 kg Körpergewicht eingesetzt. Zur Unterstützung von Kopf- und Nackenbereich kann optional die aks-Kopfstütze eingeklettet werden.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Maße: siehe Seite 54/55

Bestellnummern

Größe A - 88807

Größe B - 88808

Größe C - 88809

Kopfstütze - 88798 (optional)





aks-Kopfstütze



Die aks-Kopfstütze ist für folgende aks-Liftergurte optional erhältlich: Standardgurt, Badegurt, Komfort-Hygiengurt, Liegendtransportgurt mit 8-Punktaufnahme/ ~ zum Baden und goliath® Gurt. Verarbeitetes Flauschband an den Gurten ermöglicht das Ankletten und Positionieren der Kopfstütze durch angenähtes Klettband/Hakenband.

Bestellnummer - 88798



aks-Verlängerungsschlaufen

Die aks-Verlängerungsschlaufen ermöglichen Ihnen, die Gurtschlaufen von geeigneten aks-Liftergurten zu verlängern, um diese schnell und einfach an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten anzupassen. Sie bestehen aus extrem reißfestem Gurtband und sind einfach an den Gurtschlaufenschlaufen der aks-Liftergurte zu befestigen. Sie sind für aks-Liftergurte an Hebeliftern vorgesehen!



Durch die Verlängerung der Gurtschlaufen können folgende Ziele erreicht werden:

- Abstand des Patienten zum Transportbügel vergrößern
- leichteres Einhängen der Gurtschlaufen am Transportbügel
- Verlängerung der Beinschlaufen um eine aufrechtere Sitzposition zu erreichen oder um den Winkel der Sitzposition offener zu gestalten (in der Hüfte)



Technische Daten

Länge gefaltet: 24 cm

Effektive Verlängerung, nach Befestigung am aks-Liftergurt ca. 18 cm

Verpackungseinheit: 2 Stück

Bestellnummer

2 Stück Verlängerungsschlaufen, Größe 24 cm - 88796



aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter (dualo®)

Dieser Gurt für fahrbare Aufstehlifter unterstützt den Patienten beim Aufrichten/Absenken aus bzw. in eine sitzende Position. Die zusätzliche Brustschlaufe gibt dem Patienten, während des Aufrichtens und des Transfers, ein sicheres Gefühl. Eine Auspolsterung im Achselbereich verhindert ein Einschneiden in den Achselhöhlen.

Für Patienten bis 250 kg.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

Größe S - 88781

Größe M - 88782

Größe L - 88783

Größe XL - 88784

Größe XXL - 88785


aks-Wadengurt für Aufstehlifter (dualo®)

Der Wadengurt sichert die Beine, gibt zusätzlichen Halt und unterstützt das Abdrücken mit beiden Beinen beim Aufrichten von Patienten.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummer - 88806



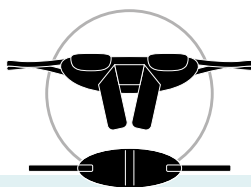

aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter torneo® II und torneo® compact

Dieser Aufrichtgurt ist ausschließlich an den Aufstehlif-
tern torino® II und torino® compact einsetzbar.
Der Aufrichtgurt ist um die Sitzschaukel erweitert.
Das Wadenband bietet dem Patienten mehr Sicherheit
und Unterstützung.
Für Patienten bis 150 kg.

Abrechnungspositionsnummer: 22.40.04.0001

Bestellnummern

Größe S - 88800
Größe M - 88801
Größe L - 88802
Größe XL - 88803
Größe XXL - 88804



Ersatz Sitzschaukel - 88805
Ersatz Wadenband - 88810




aks-Liftergurte

aks-Standardgurt
mit integrierter Rückenverstärkung
und Kopfstütze


aks-Standardgurt/
aks-Badegurt

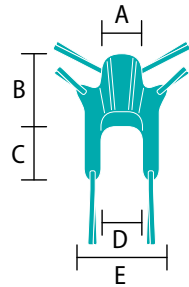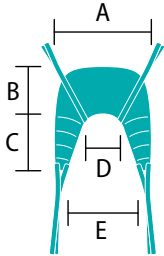


aks-Komfortbadegurt/-Komfortgurt
mit integrierter Kopfstütze

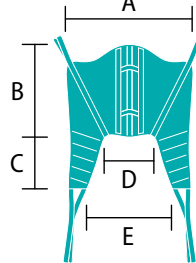


aks-Badegurtes
mit Kopfstütze Flex

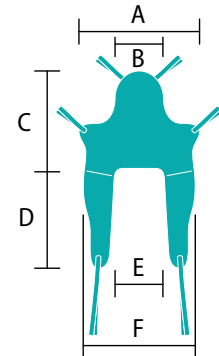


aks-Badegurt mit Rückenverstärkung
und integrierter Kopfstütze

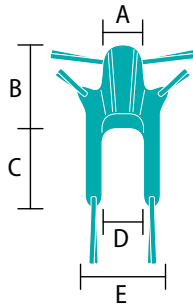


aks-Hygienegurt

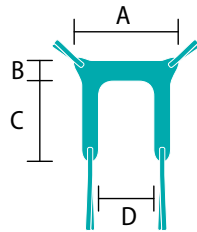


aks-Komfort-Hygienegurt

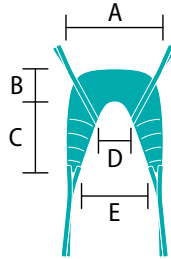


aks-Hygienegurt
mit Rückenverstärkung

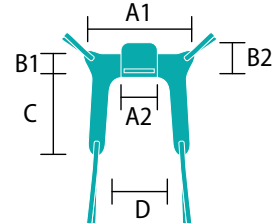


aks-Schnelltransportgurt
mit Brustschleife/
~ zum Baden

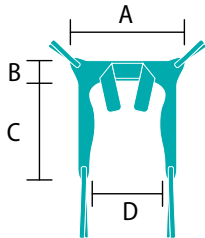


aks-Aufrichtgurt
(2 Einzelgurte)

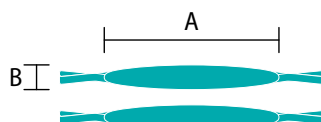


aks-Universal-Komfortgurt

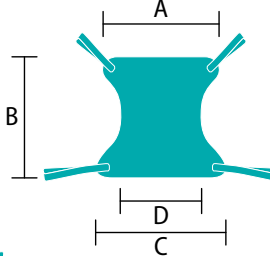


aks-Liegendtransportgurt

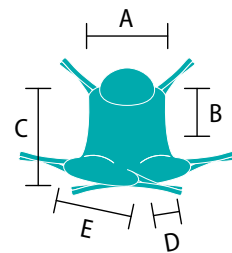


aks-Universal-Netzgurt/
aks-Universalgurt Flex

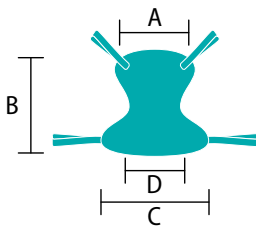


aks-Liegendtransportgurt
mit 8-Punktaufnahme/
~ zum Baden

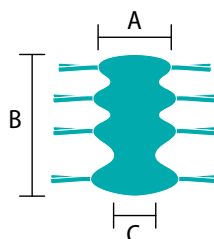

aks-Aufrichtgurt
mit Brustschleife für Aufstehlifter/
~ torneo® II und torneo® compact

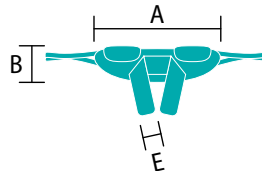

goliath® Gurt

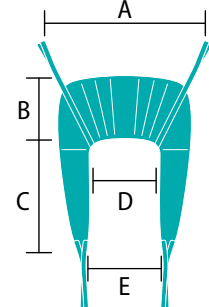

	A	B	C	D	E	F	Brustschlaufe
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe S	76	56	52	28	50		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe M	89	56	60	30	59		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe L	91	56	73	32	62		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe XL	96	59	78	36	68		
aks-Standardgurt/aks-Badegurt, Größe XXL	104	64	81	44	80		
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe S	90	38	90	60	35	70	
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe M	95	40	105	65	40	85	
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe L	100	43	110	70	45	88	
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe XL	110	45	110	85	50	92	
aks-Badegurt mit Kopfstütze Flex, Größe XXL	120	45	115	100	50	96	
aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe S	38	89	42	35	60		
aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe M	40	103	65	50	74		
aks-Standardgurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe L	40	111	65	50	76		
aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe S	38	89	42	35	60		
aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe M	40	103	65	50	74		
aks-Badegurt mit Rückenverstärkung und integrierter Kopfstütze, Größe L	40	111	65	50	76		
aks-Hygienegurt, Größe S	90	22	65	40	-		
aks-Hygienegurt, Größe M	97	22	71	44	-		
aks-Hygienegurt, Größe L	108	25	78	58	-		
aks-Hygienegurt, Größe XL	120	25	90	64	-		
aks-Hygienegurt, Größe XXL	130	27	110	74	-		
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe S	86/29	24/36	65	38			
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe M	96/33	26/40	69	47			
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe L	107/34	28/40	75	51			
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe XL	118/37	25/40	89	63			
aks-Hygienegurt mit Rückenverstärkung, Größe XXL	128/47	26/45	107	68			
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe S	78	32	70	24	46		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe M	88	39	77	28	58		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe L	96	42	95	32	65		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe XL	105	45	105	40	69		
aks-Komfort-Hygienegurt, Größe XXL	115	45	120	49	73		
aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze/aks-Komfortbadegurt~, Größe S	98	79	45	42	66		
aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze/aks-Komfortbadegurt~, Größe M	122	89	46	46	74		
aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze/aks-Komfortbadegurt~, Größe L	135	92	64	47	82		
aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze/aks-Komfortbadegurt~, Größe XL	152	94	87	52	80		
aks-Komfortgurt mit integrierter Kopfstütze/aks-Komfortbadegurt~, Größe XXL	164	100	108	56	70		
aks-Universal-Komfortgurt, Größe M	84	100	85	45	-		
aks-Universal-Komfortgurt, Größe L	110	109	109	71	-		
aks-Universal-Komfortgurt, Größe XL	128	116	131	90	-		
aks-Universal-Komfortgurt, Größe XXL	152	114	151	109	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe S	110	126	107	56	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe M	115	133	117	62	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe L	130	140	129	68	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe XL	145	145	144	83	-		
aks-Universal-Netzgurt/aks-Universalgurt Flex, Größe XXL	160	145	160	98	-		
aks-Liegendtransportgurt, Größe M	86	60	103	31	77		
aks-Liegendtransportgurt, Größe L	95	60	103	33	82		
aks-Liegendtransportgurt, Größe XL	105	65	108	35	87		
aks-Liegendtransportgurt, Größe XXL	115	65	108	37	95		
aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme/~ zum Baden, Größe M	66	183	46	-	-		
aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme/~ zum Baden, Größe L	75	189	66	-	-		
aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme/~ zum Baden, Größe XL	85	189	76	-	-		
aks-Liegendtransportgurt f. T. mit 8-Punktaufnahme/~ zum Baden, Größe XXL	100	189	81	-	-		
aks-Aufrichtgurt (2 Einzelgurte), Größe M	110	17	-	-	-	-	
aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe/~ zum Baden, Größe S	93	24	70	54/35	-	-	124
aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe/~ zum Baden, Größe M	113	24	96	75/66	-	-	138
aks-Schnelltransportgurt mit Brustschlaufe/~ zum Baden, Größe L	113	24	96	75/66	-	-	167
goliath® Gurt A siehe bariatrisches Programm	112	68	94	50	70		
goliath® Gurt B siehe bariatrisches Programm	126	72	106	63	94		
goliath® Gurt C siehe bariatrisches Programm	140	76	120	78	102		
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter/~ torneo®..., Größe S	87	27	-	-	16	-	114
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter/~ torneo®..., Größe M	105	29	-	-	16	-	138
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter/~ torneo®..., Größe L	120	29	-	-	16	-	147
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter/~ torneo®..., Größe XL	141	29	-	-	16	-	167
aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter/~ torneo®..., Größe XXL	141	29	-	-	16	-	178
aks-Wadengurt	140	18	-	-	-		